

TEIJIN

持続陽圧呼吸療法装置 (CPAP)

スリープメイト[®] S8

承認番号：21700BZY00200000

COMPACT
&
CARD



手のひらサイズ、カードシステム搭載。
妥協なきコンパクトサイズ
スリープメイト[®] S8 デビュー!

健保適用



製品構成

- スリープメイトS8本体
- エアチューブ(2m)
- AC電源コード
- 予備フィルター
- キャリーバッグ
- 取扱説明書

付属品がコンパクトに収まるキャリーバッグ



すっきり収納



取り外しも可能

主な仕様

一般的名称	持続的気道陽圧ユニット		電源入力	タイプⅠ	140VA
販売名	スリープメイトS8		電源入力	タイプⅡ	AC340VA DC12~13.8V 3.1A 24~27.6V 1.5A
承認番号	21700BZY00200000		消費電力	約18W(マスクからの空気漏れのない状態。20cmH ₂ O時)	
クラス分類	高度管理医療機器(特定保守管理医療機器)		電撃に対する保護の形式による分類	クラスⅡ機器	
圧力調整範囲	4.0~20.0cmH ₂ O		電撃に対する保護の程度による装着部の分類	CF形装着部	
寸法	164W×145D×112H(mm)		*仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。		
重量	1.36kg				
電源	タイプⅠ	AC100V、50/60Hz			
	タイプⅡ	AC100~240V、50/60Hz DC12~13.8V、24~27.6V(専用DCコンバータ使用時)			

使用上の注意

- 本装置は医師の処方および指示に従ってご使用ください。
- 本装置は生命維持のための装置ではありません。
- 本使用目的以外には使用しないでください。
- ご使用前に取扱説明書および添付文書をよく読み、正しくお使いください。

製造販売業者 **帝人ファーマ株式会社**
〒100-8585 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号

製造業者 **RESMED Limited /**
レスメドリミテッド(オーストラリア)

お問い合わせ先

コンパクト設計とカードシステムでさらに快適なCPAP療法を実現。
スリープメイト®S8は患者さんの活動範囲を広げ、より充実した診療をサポートします。



OUTSTANDING

スリープメイト®S8の特長

1 小型・軽量

従来に比べ、約1/3のサイズに(当社比)。小型・軽量ながら、底面の滑り止め構造により安定していますので、寝返りにも安心してお使いいただけます。



2 静音設計


従来の吸音材による方式から、独自の新静音方式を採用することで、小型ながら高いレベルの静音を実現しています。さらに、ファンモータ部をスプリングで支える構造により、振動も抑えられています。

3 親切設計

●日本語液晶表示や人間工学に基づいたパネルデザインにより、スムーズな操作が可能です。ボタンは暗い所でも操作できるように光ります。



●フィルター交換時期など、あらかじめ設定しておいた日にお知らせする確認機能付きです。

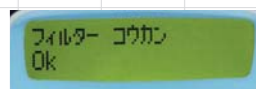


●ランプ時間*の選択の幅が広がりました。
*低い圧力から設定圧まで徐々に圧力を上げていく機能

4 カードシステム搭載

スリープメイトS8内部に保存される情報を小型カードでマネジメント。また、カードをシリアルナンバーで認識する認証機能もあります。

条件設定変更

パソコンで入力した運転条件設定をスピーディーにスリープメイトS8本体へ。また外来受診時にカードを持参すれば、条件変更や確認機能の更新も容易に可能です。

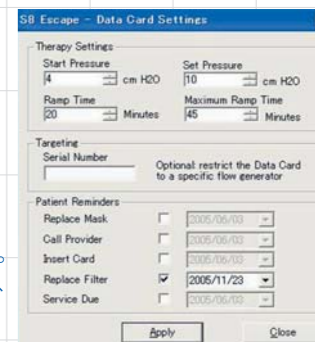

条件設定



コンプライアンスデータ




手のひらサイズのコンパクト設計



原寸大

コンプライアンスデータの取得

最長180日分のコンプライアンスデータの取得が可能です。スリープメイトS8からカードへのデータのコピーはストレスなく最大10秒で完了。カードの挿入はカードへのデータコピー時のみ。本体にデータが蓄積されるので、カード入れ忘れによる保存ミスがありません。

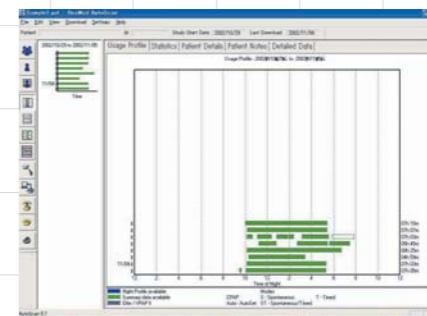

専用カードリーダー(USB接続)でのデータの保存・読み取り

COMPACT & CARD

ソフトウェア「オートスキャン5.7」 ●対応OS:Windows®98SE、Windows®2000(SP2以上)、Windows®XP以上 最低動作環境は、各OSの動作環境以上
■HD200MB以上の空き容量(本ソフトウェア専用領域として) ■CD-ROMドライブ(インストール時のみ) ■USBポート(専用カードリーダー用) ■専用カードリーダー
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。